

SAM
MEDICAL

DISTRIBUZIONE
FORMAZIONE
ASSISTENZA TECNICA
PER L'ITALIA

SAGO
MEDICA
MEDICAL EQUIPMENT

www.sagomedica.it

SAM[®] XT

Extremity Tourniquet

CLICCA. TORCI. FISSA.



PRESTAZIONI COMPROVATE

Realizzato per una rapida applicazione, SAM XT è un laccio emostatico che richiede meno torsioni dell'asta ed è semplice, veloce e intuitivo nelle applicazioni di addestramento ed uso. Soddisfa le linee guida di durabilità MIL-STD 810G.



TECNOLOGIA APPLICATA


FIBBIA TRUFORCE™

La causa principale dell'applicazione non efficace di un laccio emostatico è il gioco. La tecnologia autobloccante della fibbia TRUFORCE™ elimina quasi completamente il gioco del laccio emostatico incorporando un innovativo controllo della forza basilare con l'attivazione degli agganci bloccanti.



PROGETTATO PER SALVARE LA VITA

- 1 FASCETTA INDICATRICE DEL TEMPO**
La fascetta di chiusura a strappo resistente agli elementi funziona sott'acqua, offrendo la massima sicurezza nelle condizioni atmosferiche peggiori. Il materiale esterno è ottimizzato per la visione notturna.
- 2 GANCIO PER ASTA DI TORSIONE**
Fissa l'asta di torsione metallica con un'intuitiva configurazione angolare rendendone più facile ed efficace il bloccaggio.
- 3 PIASTRA TRUFLEX™**
La struttura durevole in nylon distribuisce la forza sotto forma di pressione mirata per produrre massima robustezza e flessibilità, piegandosi sulle estremità più piccole senza rompersi.
- 4 FIBBIA TRUFORCE™**
L'innovativa tecnologia autobloccante attiva gli agganci bloccanti, eliminando il gioco tipico di tutte le altre applicazioni di lacci emostatici.
- 5 ASTA DI TORSIONE METALLICA**
Fabbricata da barre estruse di alluminio 6061-T6 robusto ma leggero fresato dal pieno per una continua affidabilità rispetto a compositi di plastica.
- 6 CINTURA DI PRECISIONE**
I lacci emostatici che utilizzano Velcro possono essere inefficaci quando sono bagnati o sporchi. La cintura di precisione ognitempo è realizzata in tessuto di nylon a singolo strato e caratterizzata da fori intervallati che bloccano la fibbia TRUFORCE™ per creare un sistema di sicurezza primario efficiente e affidabile. La fascetta di chiusura a strappo secondaria fissa il resto della cintura, aggiungendo stabilità e sicurezza.
- 7 LINGUETTA DI PRECISIONE**
La configurazione intuitiva consente l'applicazione più rapida e facile del laccio emostatico. Il materiale è ottimizzato per la visione notturna.

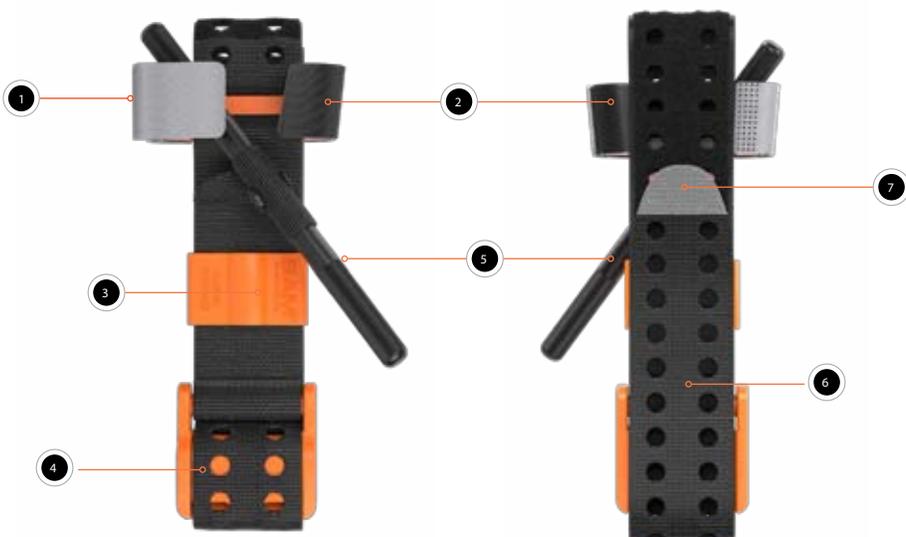

MODELLI



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

sammedical.com

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE *

Lunghezza: 6,3 cm (2,5 in)
Larghezza: 3,8 cm (1,5 in)
Altezza: 18,4 cm (7,25 in)
Peso: 108 g (3,8 oz)

SPECIFICHE OPERATIVE

La tecnologia autobloccante della fibbia TRUFORCE™ si innesta con i fori della cintura in una circonferenza compresa fra 13,9 cm e 88,9 cm (5,5 in - 35 in)

MODELLI DISPONIBILI **

Tattico Nero (SAM XT-M)
HI-VIZ Arancione (SAM XT-C)
HI-VIZ Blu (SAM XT-B)

COLLAUDATO MIL-STD-810G

EC	REP	CE	2	MADE IN AMERICA	MIL-STD-810G	RE F	SAM XT-M
Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, L'Aia, Paesi Bassi			SAM Medical Products 27350 SW 95th Ave, Ste 3038 Wilsonville, OR 97070 USA				SAM XT-C
							SAM XT-B

* Le dimensioni e il peso variano secondo la configurazione e il processo di fabbricazione.
** In attesa di brevetto
SAM® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
©2017 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



Sago Medica s.r.l.
Via Zallone, 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811
Fax +39 0516861246
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it