

SAM
MEDICAL


SAM[®] Chest Seal

CON VALVOLA 2.0

**APPLICA.
PREMI.
BLOCCA.**

OCCLUSIONE SICURA – IMMUNE AGLI ELEMENTI

La SAM[®] Chest Seal è destinata alla chiusura e richiusura ermetica di ferite aperte al torace nella maggior parte delle circostanze. Dopo una semplice e rapida applicazione, la SAM[®] Chest Seal mantiene un'adesione persistente in temperature di caldo o freddo estremo e in presenza di tutti gli elementi atmosferici. Soddisfa le linee guida CoTCCC.

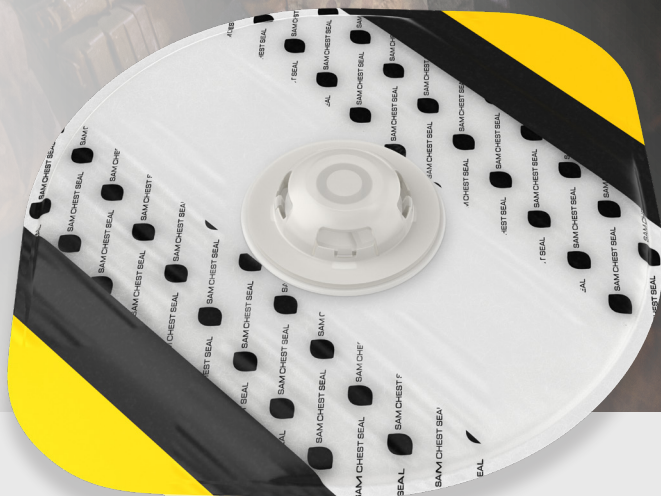


TECNOLOGIA APPLICATA

VALVOLA TRUFLOW™

La valvola a cupola rigida della SAM[®] Chest Seal assicura un flusso d'aria unidirezionale dalla cavità toracica, a prescindere dalla pressione applicata. Larghi sfiati laterali riducono al minimo l'ostruzione causata da coaguli di sangue o tessuti molli. La valvola TRUFLOW™ continua a sfiatare sia durante il trasporto sia in presenza di gilet tattici pesanti.

ADESIVO IN IDROGEL DI GRADO SUPERIORE

Gli operatori sanitari hanno sempre avuto la necessità di disporre di un adesivo sufficientemente forte da occludere una ferita coperta di sudore, sangue, peli, sabbia, acqua, ecc. L'adesivo in idrogel di grado superiore della SAM[®] Chest Seal non solo aderisce in queste situazioni, ma richiude la ferita anche dopo la rimozione per consentire lo sfiato.

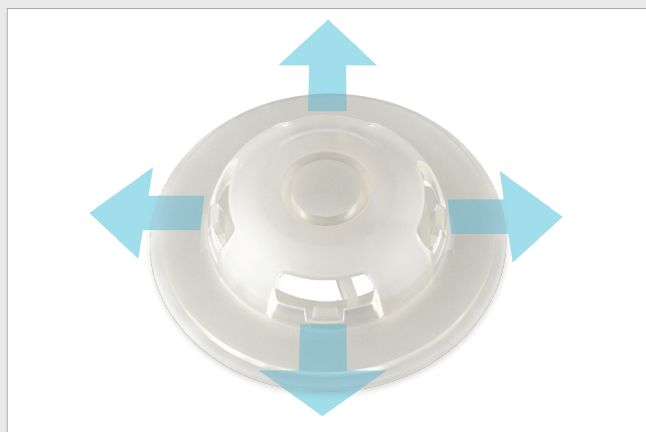

PROGETTATA PER SALVARE LA VITA

- 1 **OCCLUSIONE OVALE**
La forma ovale, più grande di altre medicazioni occlusive, massimizza l'area superficiale dell'occlusione mentre la trasparenza, l'elasticità e la conformabilità ne garantiscono un'adesione efficace.
- 2 **LINGUETTE DI APPLICAZIONE DOPPIE**
Le linguette agevolano la corretta applicazione e rimozione dell'adesivo (medicazione) consentendo lo sfiato e la richiusura.
- 3 **GEL FORTIFICATO**
Il potente idrogel aderisce in presenza di sangue, peli, sudore, sabbia e anche sott'acqua.
- 4 **VALVOLA TRUFLOW**
La valvola a cupola rinforzata, unidirezionale, consente il flusso d'aria dalla cavità toracica a prescindere dalla posizione del paziente, impedendo l'ingresso di patogeni e riducendo l'ostruzione interna causata da sangue, coaguli o tessuti molli.
(Non inclusa nella versione senza valvola)

- 5 **SUPERFICIE CON MARGINI SOTTILI**
La superficie con margini sottili ostacola il sollevamento o il distacco, mantenendo una fortissima occlusione.
- 6 **OTTIMIZZAZIONE PER VISIONE NOTTURNA**
Grazie all'ottimizzazione per la visione notturna, la confezione, la busta, il rivestimento della medicazione e le linguette offrono il contrasto ideale per la visibilità in condizioni di luce normale o scarsa e di notte (con l'uso di un dispositivo per visione notturna).



CONFEZIONE



DURATA A SCAFFALE DI 6 ANNI

La durata a scaffale, straordinaria nel settore, garantisce che la SAM® Chest Seal sia sempre pronta quando serve.

OCCLUSIONE STERILE

Riduce al minimo l'introduzione di patogeni potenzialmente nocivi durante l'applicazione.

CONFEZIONE A STRAPPO

Consente di aprire rapidamente e facilmente la confezione della SAM® Chest Seal staccandola dalle linguette o strappando lungo l'area indicata dalle frecce.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE *

Altezza: 25,4 cm (10 in)
Larghezza: 16 cm (6,3 in)
Spessore: 1,3 cm (0,5 in)
Peso: 51 g (1,8 oz)

SPECIFICHE OPERATIVE

Usare una o entrambe le linguette per agevolare l'applicazione, il sollevamento e la rimozione della medicazione. Rimuovere la medicazione rispettando il protocollo standard.

MODELLI DISPONIBILI

Combo (CS062014)
Con valvola 2.0 (CS062013)
Senza valvola (CS062011)
Con valvola (CS062010)

sammedical.com

EC	REP	CE 0050	2	Rx ONLY	STERILE R
Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, L'Aia, Paesi Bassi					SAM Medical Products 27350 SW 95th Ave, Ste 3038 Wilsonville, OR 97070 USA

* Le dimensioni e il peso variano secondo la configurazione e il processo di fabbricazione. SAM® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. ©2017 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Sago Medica s.r.l.
Via Zallone, 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811
Fax +39 0516861246
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it