

SAM
MEDICAL

SAM[®] Pelvic Sling II

INFILA. CLICCA. FISSA.

DISTRIBUZIONE
FORMAZIONE
ASSISTENZA TECNICA
PER L'ITALIA

**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT

www.sagomedica.it

STABILIZZAZIONE CON TENSIONE OTTIMALE

La SAM Pelvic Sling II è la prima e unica cintura pelvica circonferenziale, tensionabile, caratterizzata da una configurazione monopezzo con la capacità scientificamente dimostrata di ridurre e stabilizzare in modo sicuro ed efficace le fratture a libro aperto dell'anello pelvico.



TECNOLOGIA APPLICATA


FIBBIA AUTO-STOP

La fibbia AUTO-STOP SAM brevettata si attiva automaticamente impedendo la tensione eccessiva o insufficiente della SAM[®] Pelvic Sling II. Ottenuta la compressione ottimale, due agganci si attivano a scatto confermando la corretta applicazione. La cintura è fissata in posizione con una fascetta di chiusura a strappo.



PROGETTATA PER SALVARE LA VITA

- 1 **FASCIA POSTERIORE A BASSO ATTRITO**
I materiali a basso attrito che ricoprono la fascia posteriore della cintura pelvica agevolano il trasferimento del paziente dopo gravi traumi.
- 2 **FIBBIA AUTO-STOP SAM**
Clic tattili e udibili confermano l'applicazione corretta della cintura e impediscono una tensione eccessiva mantenendo al tempo stesso la compressione ottimale.
- 3 **CINTURA DI PRECISIONE**
I fori di alta precisione si bloccano con la fibbia AUTO-STOP, consentendo una rapida applicazione della cintura. La fascetta di chiusura a strappo fissa saldamente la cintura.
- 4 **FORMA AFFUSOLATA**
La parte anteriore stretta e affusolata agevola l'inserimento di cateteri urinari, la radiologia interventistica, la fissazione esterna e la chirurgia addominale, senza dover rimuovere la cintura.
- 5 **MATERIALE RADIOTRASPARENTE**
Tutti i materiali, eccetto le due molle in acciaio inossidabile sulla fibbia, sono radiotrasparenti. Ciò consente di eseguire radiografie e scansioni TC senza dover rimuovere la cintura.
- 6 **3 MISURE DISPONIBILI**
La misura Standard è applicabile al 95% della popolazione. Il set comprende anche le misure Small e Large che si adattano a quasi tutte le corporature.

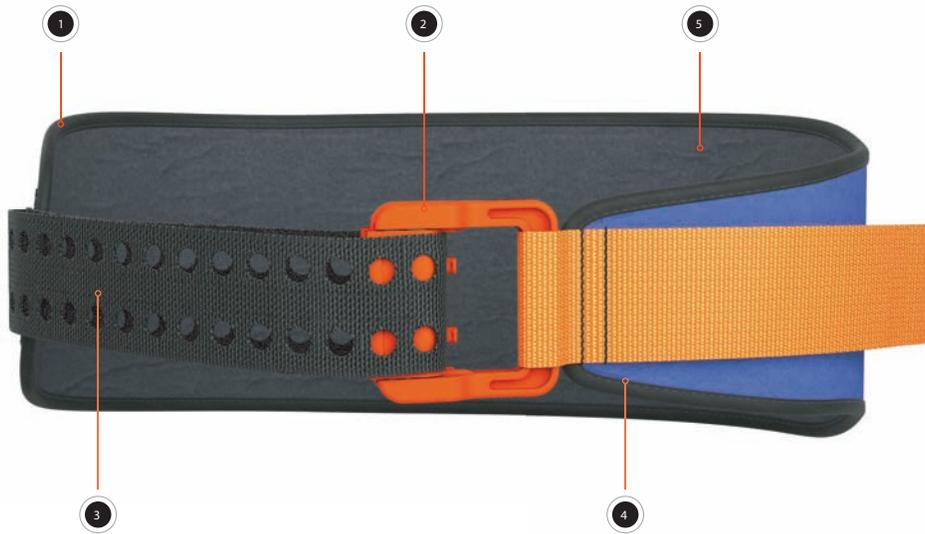

MODELLI



CIVILI
ARANCIONE/BLU



MILITARI
VERDE OLIVA/NERO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

sammedical.com

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

Altezza: 14 cm (5,5 in)
Larghezza: 19 cm (7,5 in)
Spessore: 9,5 cm (3,75 in)
Peso: 244 - 250 g (8,6 - 9,2 oz)

PRINCIPIO OPERATIVO

La tensione ottimale è raggiunta con una pressione circonferenziale di 150 N, che estende gli agganci dalla fibbia AUTO-STOP SAM[®] attraverso la cintura di precisione.

MODELLI DISPONIBILI

Civili
Small 69-114 cm/27-45 (SL556652-SM)
Standard 81-127 cm/32-50 (SL556652)
Large 91-137 cm/36-54 (SL556652-LG)

Militari

Standard 81-127 cm/32-50 (SL556652-OD)



Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
25114 AP, L'Aia, Paesi Bassi



SAM Medical Products
27350 SW 95th Ave, Ste 3038
Wilsonville, OR 97070 USA



COMPATIBILITÀ RM CONDIZIONATA A 3 T

* Le dimensioni e il peso variano secondo la configurazione e il processo di fabbricazione.

**Il peso varia secondo le misure (Small, Standard, Large)
SAM[®] è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

©2017 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



Sago Medica s.r.l.
Via Zallone, 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811
Fax +39 0516861246
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it